

VERSAN® FLUID/ ВЕРСАН® ФЛЮИД

Протез синовиальной жидкости

Состав:

Действующее вещество: гиалуронат натрия 25 мг.
Вспомогательные вещества: динатрия фосфата додекагидрат, натрия диводорода фосфата дигидрат, натрия хлорид, стерильная инъекционная вода q.s. до 2,5 мл. pH 6,8–7,8.

Описание:

Versan® fluid / Версан® флюид – это продукт, который поставляется в стеклянном шприце с гиалуроновой кислотой. Versan® fluid / Версан® флюид – это прозрачный, вязкий, стерильный непиогенный раствор. Содержащаяся в составе гиалуроновая кислота (молекулярная масса 650000–1200000 Da) добывается из микроорганизмов. Данный продукт предназначен для однократного употребления. Гиалуроновая кислота – это натуральный полисахарид, являющийся важным структурным элементом кожи, подкожной и соединительной ткани (напр., синовиальной жидкости). Выявляемая во всех живых организмах гиалуроновая кислота является идентичной и отличается высоким уровнем биосовместимости. В каждом миллилитре Versan® fluid / Версан® флюид содержится 10 мг натрия гиалуроната, разбавленного в физиологическом растворе. pH Versan® fluid / Версан® флюид колеблется между 6,8 и 7,8.

Упаковка: в одном шприце 2,5 мл раствора.

Показания:

Versan® fluid / Версан® флюид предназначается для лечения суставной боли, вызываемой остеоартритом (OA).

Употребление:

В период терапии используются 3 шприца Versan® fluid / Версан® флюид, по 1 шприцу каждую неделю, путем инъекции в пораженный остеоартритом (OA) сустав взрослого пациента. Versan® fluid / Версан® флюид предназначается для инъекций в сустав. Дозировка и время инъекции устанавливаются в зависимости от симптомов, которые ощущает пациент. Для шприца Versan® fluid / Версан® флюид подбирается игла 18-25 G, с помощью которой содержимое шприца вводится в полость сустава.

Терапевтический эффект:

Versan® fluid / Версан® флюид может компенсировать передаваемое извне механическое напряжение. Это определенный барьер, защищающий сустав. Versan® fluid / Версан® флюид может защитить синовиальную ткань и стимулировать заживление суставного хряща.

Противопоказания:

- Нельзя употреблять пациентам с высокой чувствительностью к препаратам гиалуроната.
- Внутрисуставные инъекции противопоказаны в случае, если в области инъекции была и есть инфекция или при кожном заболевании.

Предостережение:

Versan® fluid / Версан® флюид предназначен для использования в качестве внутрисуставного имплантата. Запрещено повторно стерилизовать Versan® fluid / Версан® флюид или смешивать его с другими продуктами.

Не делайте инъекции данного препарата в кровеносные сосуды и окружающие ткани. Врач должен следить за пациентами, у которых когда-либо проявлялась аллергия к любым иным лекарственным препаратам, и за больными с заболеваниями печени.

Запрещено использовать продукт, содержащийся в поврежденной упаковке.

Повторное использование одного и того же шприца может вызвать смерть пациента в результате инфекции или воспаления.

Лечение пожилых людей:

Так как функции органов у пожилых людей часто бывают ослабленными, во время терапии врач должен осуществлять за ними особый надзор.

Лечение беременных и кормящих матерей:

Употребление Versan® fluid / Версан® флюид можно назначать, если предполагаемая польза от лечения превышает вред от возможного побочного действия. Кормящие матери во время лечения должны прекратить грудное вскармливание ребенка.

Лечение детей:

Безопасность продукта для лечения детей не проверена, поэтому врач во время терапии должен осуществлять особый надзор за пациентом.

Важно!

Versan® fluid / Версан® флюид могут назначать только медицинские работники, сертифицированные в соответствии с действующим национальным законодательством. Шприц, игла и любые иные неиспользованные материалы должны ликвидироваться сразу после лечебного сеанса. Запрещено употреблять продукт в поврежденной упаковке. Перед употреблением данного изделия, прочтите инструкции.

Условия хранения:

Как указано на упаковке. Хранить при комнатной температуре. Беречь от солнечных лучей и холода.

Дата изготовления и срок употребления:

См. этикетку и упаковку продукта.

Срок годности: 3 года.



Valentis AG

Via Lugano 13, CH-6982 Agno-Lugano, Швейцария.

Символы на упаковке:

	Повторно не употреблять		Запрещено употреблять продукт в поврежденной упаковке.
	Температурное ограничение		Код партии
	Дата изготовления		Изготовитель
	Употреблять до		Смотреть правила употребления
	Содержимое шприца стерилизовано способом асептической обработки.		
	Продукт обозначен знаком CE по MDD 93/42/EEC; Номер 0434 присвоен Versan® fluid / Версан® флюид объявленным учреждением		